
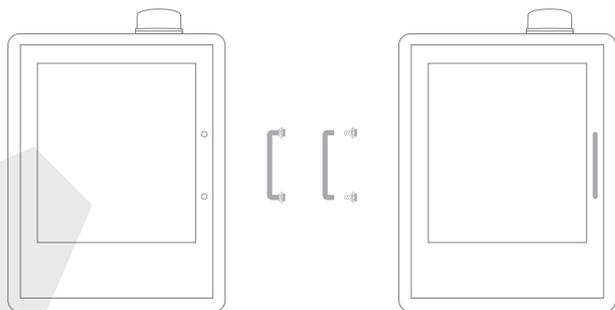


AED壁柜说明书

AED WALL CABINET MANUAL

W 壁柜系列

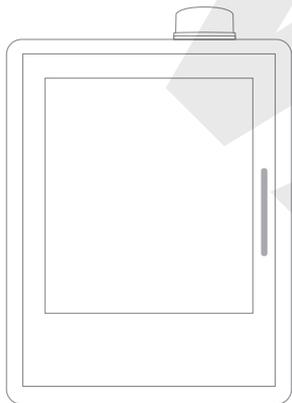

- 1 拧下不锈钢把手上的两颗螺丝
- 2 将把手孔位和柜门孔位对齐
- 3 将螺丝穿过柜门孔位对准把手孔位
- 4 拧紧两颗螺丝后完成把手安装

柜体安装

INSTALL

注意事项

在安装AED壁柜之前，先确认墙面材料是否能钻孔，墙体是否能承载柜体。以确保柜体安装的稳定和安全。

墙体孔位



柜体孔位

- 1 在墙面上钻三个直径8毫米的孔
- 2 将三颗膨胀螺丝分别打入三个孔中
- 3 将柜体背面的三个孔与膨胀螺丝对齐
- 4 螺钉拧入膨胀螺丝后完成AED壁柜安装


后期维护

BATTERY

W 壁柜系列

更换电池

取出电池盒时，切勿用力拉扯，以免导致线材松动。

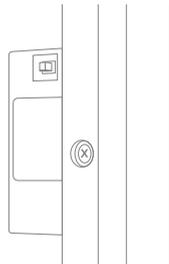

- 1 打开AED柜门
- 2 顺着方向取出电池盒
- 3 打开电池盒盖
- 4 取出电池
- 5 按方向装入新电池
- 6 盖上电池盒盖
- 7 将电池盒放入电池仓