


## AED立柜说明书


AED STANDING CABINET MANUAL

S 立柜系列

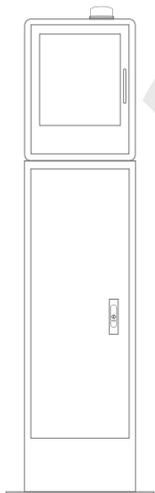

## 安装把手

- 1 拧下不锈钢把手上的两颗螺丝
- 2 将把手孔位和柜门孔位对齐
- 3 将螺丝穿过柜门孔位对准把手孔位
- 4 拧紧两颗螺丝后完成把手安装

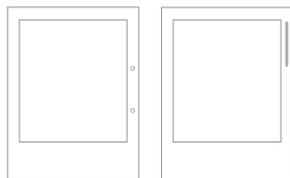

## 安装厚款底座(高4cm)

- 1 将柜体放于底座上同时确保放稳
- 2 将柜体底部孔位与底座孔位对齐
- 3 将垫片和弹簧垫圈套在六角螺栓上
- 4 拧紧六角螺栓后完成底座安装

柜体孔位

底座孔位

## 安装薄款底座(高0.5cm)

- 1 将柜体底部孔位与底座上螺栓对齐
- 2 将垫片和弹簧垫圈套在底座螺栓上
- 3 拧紧六角螺母后完成底座安装

柜体孔位

底座螺栓

## 柜体安装

INSTALL

### 注意事项

在安装AED立柜之前,先确认地面材料是否能钻孔,以确保柜体安装的稳定和安全。

### 安装步骤 (薄款底座)


- 1 在地面上钻四个直径10毫米的孔
- 2 将四颗膨胀螺栓分别置入四个孔中
- 3 拧紧膨胀螺栓的六角螺母几圈后
- 4 膨胀管受力张开后固定在地面
- 5 拧下螺母、取下垫片和弹簧垫圈
- 6 将柜体底座的四个孔与膨胀螺栓对齐
- 7 将垫片和弹簧垫圈套在膨胀螺栓上
- 8 拧紧六角螺母后完成AED立柜安装

## 后期维护

BATTERY

### 更换电池

取出电池盒时,切勿用力拉扯,以免导致线材松动。

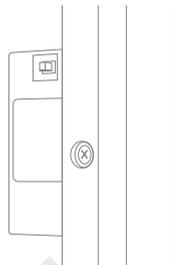

- 1 打开AED柜门
- 2 顺着方向取出电池盒
- 3 打开电池盒盖
- 4 取出电池
- 5 按照方向装入新电池
- 6 盖上电池盒盖
- 7 将电池盒放入电池仓