



AED视频立柜说明书

AED VIDEO CABINET MANUAL

V 视频柜系列

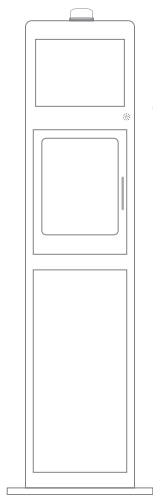

安装把手

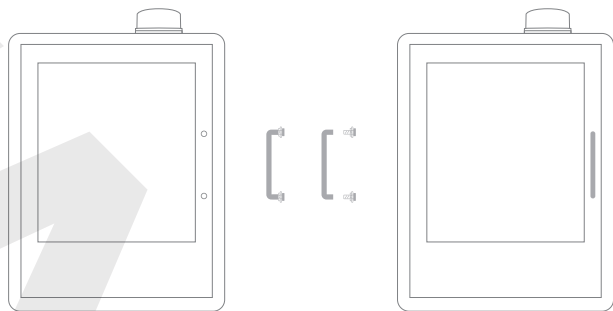

- 1 拧下不锈钢把手上的两颗螺丝
- 2 将把手孔位和柜门孔位对齐
- 3 将螺丝穿过柜门孔位对准把手孔位
- 4 拧紧两颗螺丝后完成把手安装

安装底座




- 1 将柜体放于底座上同时确保放稳
- 2 将柜体底部孔位与底座孔位对齐
- 3 将垫片和弹簧垫圈套在六角螺栓上
- 4 拧紧六角螺栓后完成底座安装

后期维护

INSTALL

V 视频柜系列


更换视频

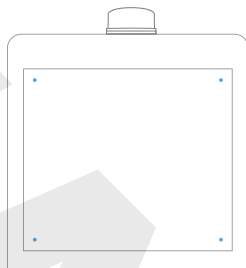

- 1 拧下背板的四颗螺丝
- 2 取下金属背板
- 3 拔出U盘拷入视频
- 4 重新把U盘插到USB接口
- 5 盖上金属背板
- 6 拧紧四颗螺丝后完成视频更换

更换电池

取出电池盒时,切勿用力拉扯,以免导致线材松动。

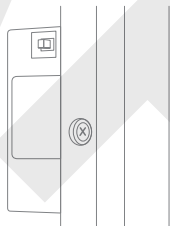

- 1 打开AED柜门
- 2 顺着方向取出电池盒
- 3 打开电池盒盖取出电池
- 4 按照方向装入新电池
- 5 盖上电池盒盖
- 6 将电池盒放入电池仓